

平成 30 年 11 月 吉日

お取引先各位

埼玉県三郷市三郷 2 丁目 3-11 イネ
ネオメディカル株式会社
代表取締役 田中 和彰



「ICHI-FIXATOR システム」 器械セット内容変更のお知らせ



拝啓、貴社ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、頭書の件につき、下記のとおり器械セットの内容を変更することをお知らせいたします。

また引き続き倍旧のご厚情を賜りたく、宜しく願い申し上げます。

敬具

カタログ番号	製品名	変更点	理由
D-IF-104	ドライバーハンドル	セットから除外	ハンドルの使用により必要以上にトルクを掛けすぎてしまうため
D-IF-105	ドライバービット	ドライバーハンドルとの接続ができません(接続形状を持っていない)	ハンドルをセットから除外したため
旧ビット			
新ビット			

新しい器械セット内容では、ICHI-FIXATOR のネジは、ビットを直接手で回して締めて下さい。

※ドライバービットのカタログ番号に変更はありません。また、その他の器械の変更はありません。